


## SYNAPSE (Radiologie)

Pour ouvrir une session réseau, appuyez sur **Alt + Ctrl + Supp**  
Inscrivez votre code d'utilisateur et votre mot de passe




Double-cliquer sur l'icône pour ouvrir l'application Synapse

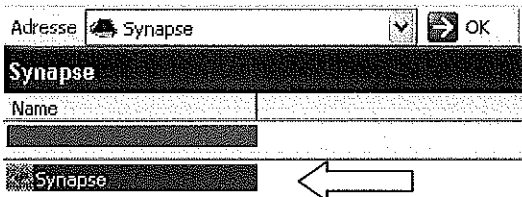

Double-cliquer sur Synapse pour accéder à la liste des patients et des examens

Lorsque la liste apparaît à l'écran, double-cliquer sur « All studies »

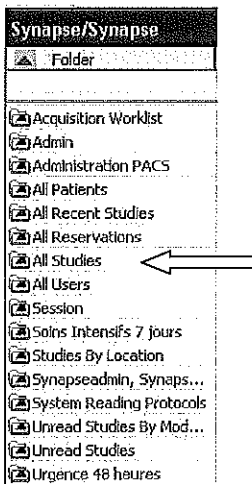

**Code d'utilisateur : rx1**  
**Mot de passe : rx1**

Inscrire le numéro de dossier du patient ou son nom dans les champs appropriés et ENTER

Patient Name	Accession ...	Patient ID	Proc Description	Study Date Time	Moda...	Status	I..	Proc ...	Last Modified
x007									
Bond, James	1531162	X007	CRANE (3 INC. OU...)	2009-12-01 17:35:01	XA	Final...	2	8010	2009-12-02 1
Bond, James	1460985	X007	BIOPSIE TROCART MASSE MAMMAIR...	2009-03-17 07:59:29	CR	Final...	17	0849...	2009-11-18 0
Bond, James	1493171	X007	POUMONS (P.A. ET LAT) 2 INC OU M...	2009-08-04 11:32:48	US	Final...	4477	8100	2010-01-11 0

Double-cliquer ensuite sur la ligne de l'examen que vous voulez visualiser pour voir les images

Patient Name	Accession ...	Patient ID	Proc Description	Study Date Time	Moda...	Status	I..	Proc ...	Last Modified
x007									
Bond, James	1531162	X007	CRANE (3 INC. OU...)	2009-12-01 17:35:01	XA	Final...	2	8010	2009-12-02 1
Bond, James	1460985	X007	BIOPSIE TROCART MASSE MAMMAIR...	2009-03-17 07:59:29	CR	Final...	17	0849...	2009-11-18 0
Bond, James	1493171	X007	POUMONS (P.A. ET LAT) 2 INC OU M...	2009-08-04 11:32:48	US	Final...	4477	8100	2010-01-11 0

Cliquer dans l'image pour avoir un pointillé, vous pourrez ainsi vous déplacer dans les images avec la roulette de la souris ou les flèches sur le clavier

En tout temps, vous pouvez remonter à la liste précédente en utilisant le bouton **Dossier parent** sur la barre d'outils en haut



Différents outils sont disponibles sur la barre d'outils Synapse située en haut de la fenêtre. En cliquant sur les icônes, vous pouvez :



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> Comparer avec un examen antérieur<br/>Choisir l'examen et le glisser à côté de l'autre</p> <p><b>2</b> Afficher informations de la requête</p> <p><b>3</b> Afficher le rapport d'examen si disponible</p> | <p><b>4</b> Visualiser ou écrire une note<br/>** Elle sera permanente</p> <p><b>5</b> Sélectionner des séries ou des examens</p> <p><b>6</b> Modifier la mise en page/Division de l'écran<br/>Pour comparer, diviser l'écran en 2</p> |
|---|---|

En cliquant sur le bouton droit de votre souris (quand vous êtes sur une image) un menu contextuel vous apparaît, vous offrant une autre série d'outils, les plus utilisés sont :

	<p><i>Window Level</i> : Permet de changer le contraste et la densité</p> <p><i>Zoom</i> : Agrandissement</p> <p><i>Pan</i> : Déplacement dans l'image agrandie</p> <p><i>Ruler</i> : Règle pour mesurer</p> <p><i>Text</i> : Permet d'inscrire une annotation</p> <p>Les autres sont moins utilisés</p> <p><i>Image Presets</i> : Différentes options de traitement d'images (Détail osseux, tissus mous..) vous sont proposées</p> <p><i>Scale, Rotate, Flip</i> : Rotation de l'image</p> <p><i>Tools</i> : Dans la liste du sous-menu, <i>Interactive ROI</i> est le plus utilisé, c'est une loupe</p> <p>Sélectionnez l'outil en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Pour les 7 premiers outils, il faut maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et ensuite glisser la souris de haut en bas ou de gauche à droite</p>
--	---

Pour fermer Synapse, cliquez sur le bouton **Fermer la fenêtre ( X )** en haut à droite de l'écran



N'oubliez pas *qu'il est important de fermer votre session réseau*. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Démarrer** en bas à gauche de l'écran. Sélectionner **Fermer la session** ou **Alt + Ctrl** et la touche **Supp**, dans le tableau qui apparaît **Fermer la session**



Pour dépannage, veuillez communiquer avec la gestionnaire PACS du Service de radiologie au 819-478-6464, poste 23177 ou 23200 ou sur la pagette au 819- 470-5747